
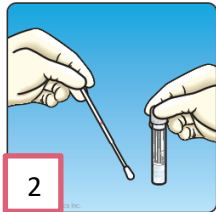


Uitstrijken e-swab


Was uw handen voordat u begint.

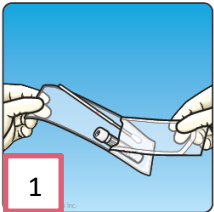


1. Open gedeeltelijk de verpakking van het wattenstaafje en haal het wattenstaafje eruit. Raak de zachte punt niet aan en leg het wattenstaafje niet neer. **Als de zachte punt is aangeraakt, gevallen of neergelegd, vraag dan een nieuwe.**

2. Houd het wattenstaafje vast tussen duim en wijsvinger **boven** de roze lijn. **Als u de wattenstaafje onder de roze lijn heeft aangeraakt, vraag dan een nieuwe.**

3. Neem het materiaal af van de plek waar het om gaat.

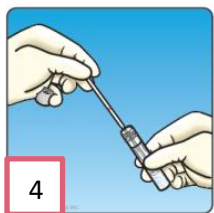

4. Terwijl u het wattenstaafje vasthoudt, draait u de dop van het transportbuisje open. Mors de inhoud van het transportbuisje niet. **Als u de inhoud van het buisje morst, vraagt u een nieuwe.** Steek het wattenstaafje onmiddellijk in het transportbuisje.

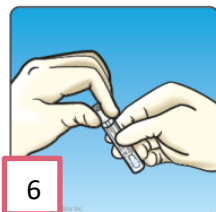

5. Breek de steel van het wattenstaafje voorzichtig af op de roze lijn tegen de zijkant van het transportbuisje. Het wattenstaafje valt op de bodem van het transportbuisje. Gooi het overige deel van het wattenstaafje weg.

6. Draai de dop weer stevig op het transportbuisje

Voorzie het materiaal van patiëntengegevens.