

Afname instructie bloedkweek

Was uw handen voordat u begint.

Neem bij kinderen < 4 jaar één bloedkweekflesje met roze label af.

Neem bij kinderen > 4 en volwassenen minstens 2 setjes bloedkweken af (1 setje bloedkweken bestaat uit een aerob en anaerob flesje)



1. Leg de stuwband aan en desinfecteer de huid 0,5% chloorhexidine-alcohol.
2. Laat het desinfectans drogen aan de lucht.
3. Verwijder de beschermkapjes van de flesjes en desinfecteer de rubber doppen en laat desinfectans drogen aan de lucht.
4. Haal de vlindernaald uit de verpakking
5. Schroef de naald met rubber omhulsel in de vacutainer.
6. Zorg ervoor dat het uiteinde van de naald met rubber omhulsel steriel blijft
7. Verwijder het beschermhulsje van de vlindernaald.
8. Prik de vlindernaald in de ader.
9. Druk eerst het grijze (aërobe) flesje in de vacutainer en laat 8- 10 ml bloed inlopen. Kijk voor indicatie van het volumen op de zijkant van het flesje. Één streepje is 5 ml. (NB: niet >12 ml laten inlopen).
10. Trek het flesje voorzichtig uit de vacutainer.
11. Vul vervolgens het paarse (anaërobe) flesje op dezelfde wijze.
12. Schuif het gele beschermhoesje over de vlindernaald.
13. Vul op het etiketje op de flesjes de patiëntengegevens in of plak een patiëntensticker op iedere fles.
Indien er een EPIC/GLIMS ordersticker gebruikt wordt zorgt u er dan voor dat er op één setjes bloedkweekflesjes hetzelfde ordernummersicker wordt geplakt.

NB: plak nooit een sticker over de barcode van het flesje en verwijder nooit een gedeelte van de barcode van de fles.