
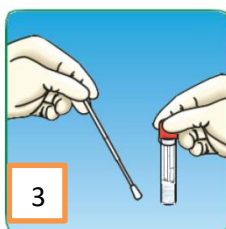


Afname instructie feces/Ontlasting

Was uw handen voordat u begint.

Voor ontlastingsonderzoek worden er 2 materialen gebruikt (een FecalSwab en een potje).


1. Vang de feces op in een daarvoor geschikt bakje indien het toilet geen plateau heeft.

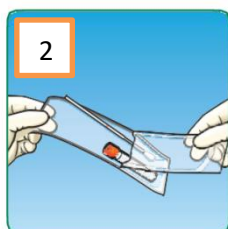

FecalSwab:



2. Open gedeeltelijk de verpakking van het wattenstaafje en haal het wattenstaafje eruit. Raak de zachte punt niet aan en leg het wattenstokje niet neer.

3. Houd het wattenstokje tussen duim en wijsvinger **boven** het roze streepje

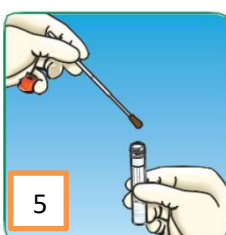



4. Steek het wattenstaafje in de feces en draai het stokje rond. Haal het wattenstaafje uit de feces en controleer of er zichtbaar feces aanwezig is op het wattenstaafje.

5. Draai de dop van het transportbuisje open terwijl u het wattenstaafje in de hand houdt. Mors de inhoud van het transportbuisje niet.

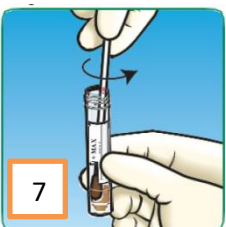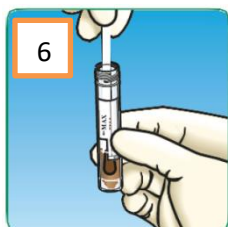


6. Steek het wattenstaafje onmiddellijk in het transportbuisje

7. Draai het wattenstaafje rond.

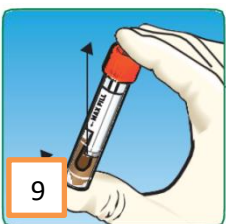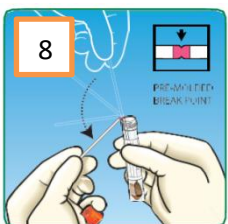

8. Breek de steel van het wattenstaafje voorzichtig af bij de lijn en gooi het overige deel weg en draai de dop weer goed vast op het transportbuisje.

9. Schud het transportbuisje goed tot dat het vloeistof overal dezelfde kleur heeft.

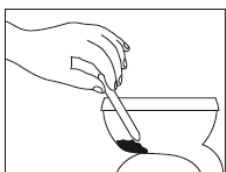

Potje:

10. Gebruik het schepje die aan de dop van het potje vastzit om 1 schepje feces te pakken, doe dit in het potje en draai de dop weer dicht.

Voorzie het materiaal van patiëntengegevens.