


Afname instructie SOA vrouw

Was uw handen voordat u begint.

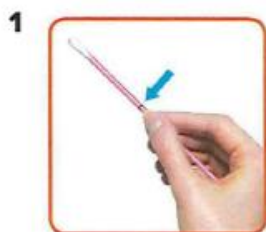

Open gedeeltelijk de verpakking van het wattenstaafje en haal het wattenstaafje eruit. Raak de zachte punt niet aan en leg het wattenstaafje niet neer. **Als de zachte punt is aangeraakt, neergelegd of gevallen, vraag dan een nieuwe Aptima Multitest collectie kit.** Houd het wattenstaafje vast tussen duim en wijsvinger in het midden van de steel, zodat de zwarte lijn bedekt is.



Steek het wattenstaafje voorzichtig in de vaginaopening, tot ongeveer 5 centimeter diep, en draai het wattenstaafje zachtjes gedurende 10 tot 30 seconden rond. Zorg ervoor dat het wattenstaafje de wanden van de vagina raakt, zodat er vocht door het wattenstaafje wordt geabsorbeerd. Trek het wattenstaafje er weer uit zonder uw huid aan te raken.



Terwijl u het wattenstaafje vasthoudt, draait u de dop van het transportbuisje. Mors de inhoud van het transportbuisje niet. **Als u de inhoud van het busje morst, vraagt u een nieuwe Aptima Multitest collectie kit.** Steek het wattenstaafje onmiddellijk in het transportbuisje, zo dat de zwarte lijn aan de bovenkant van het transportbuisje zit. Breek de steel van het wattenstaafje voorzichtig af op de zwarte lijn tegen de zijkant van het transportbuisje. Het wattenstaafje valt op de bodem van het transportbuisje. Gooi het overige deel van het wattenstaafje weg.



Draai de dop weer stevig op het transportbuisje.

Voorzie het materiaal van patiëntengegevens.