

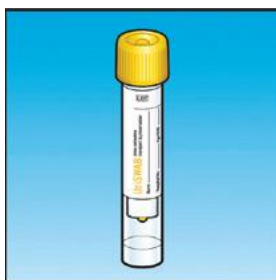


Urine uriswab


Was uw handen voordat u begint.

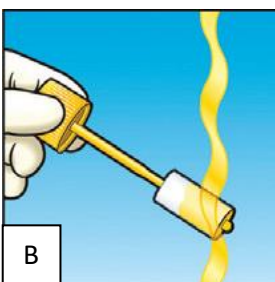

Draai de dop van het transportbuisje en houd deze vast. Raak de sponsjes niet aan.

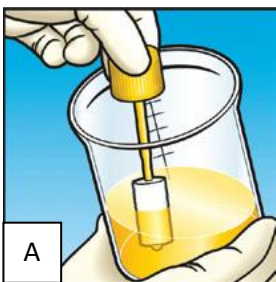

Optie A: vang de urine op in een urine afname beker die vrij is van conserveringsmiddelen. Doop de sponsjes in de urine tot dat de sponsjes volgezogen zijn.
Optie B: urineer over de sponsjes heen tot dat deze volgezogen zijn.

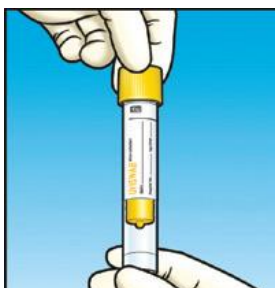

Steek de houder met de sponsjes terug in het transportbuisje en draai de dop weer stevig vast.

Voorzie het materiaal van patiëntengegevens.